

Sasaela

天使の足音  
むくみケア靴下



着用方法  
説明書



カラー：ブラック／モカベージュ

1



履き口を丸めます。


2

※膝の上で脚を組むと  
合わせやすいです。



つま先の位置を  
合わせます。

3

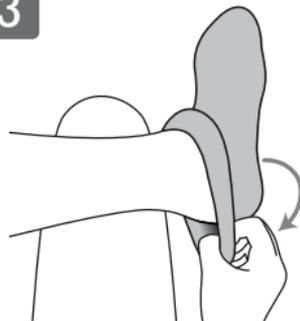

かかとの位置



かかとの位置を  
合わせます。

4



履き口をなでる  
ように優しく上げて  
いきます。

5



履き口を折り  
返すと、ズレ  
にくくなります。



強く引っ張り上げないで  
ください。生地が傷む  
もとになります。

