

生まれたその日から新生児の首を守る

# 院内専用マイピーロネオ+

出生直後から新生児の首を守る“首枕”を開発しました。

気道が確保され、頸～胸部の脊柱の生理的彎曲が維持されるので、ポジショニングも楽にできます。

泣き止まない新生児の後頭窩～首～肩をそっと触ってみてください。硬いコリがありませんか？

慢性的な頭痛やめまい、耳鳴りなどにつながるコリをほぐすため、院内専用マイピーロネオ+で赤ちゃんの首をケアしてあげましょう。



ベビハグ

日本製

【使用素材】  
綿・PU・プラスチックビーズ  
【対象目安】  
2.5kg～4.5kg



“まるまるねんね” がしやすい！

生まれたばかりの赤ちゃんの背骨はまるいC型。健やかな背骨の成長には、背中をまるくしっかり保つ“まるまるねんね”がとても大切です。

院内専用マイピーロネオ+と“まるまるねんね”で、健やかな背骨育てをしましょう！

あごが強く引けて  
息苦しい…



院内専用マイピーロネオ+  
なしだと

息が楽にできて  
すやすやねんね  
できます。



院内専用マイピーロネオ+  
を使うと

ポジショニング（姿勢調整）



仰向けばかりだと、向きぐせや“絶壁頭”といったお悩みにつながることも。

授乳ごとに右向き→仰向け→左向き→右向き→…と体位を変えて丸い頭で退院できるようにしてあげましょう。



骨盤ケアとマタニティ&ベビーケア用品

トコちゃんベルトの青葉

有限会社 青葉 <https://toco-chan.jp>  
〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1  
TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508



※開封後の交換・返品はお受けできませんので、ご注意ください。  
※開封前の交換・返品は、購入先にお問い合わせください。





## おひなまきと一緒に使って授乳もしやすく！

院内専用マイピーロネオ+とおひなまきと一緒に使うと、ぐらぐら、ガクンしがちな新生児の首をしっかり支えるので、抱っこも授乳も楽々になります。



おひなまきの使い方はこちら →



院内専用マイピーロネオ+なしだと



院内専用マイピーロネオ+とおひなまきを使うと

## おひなまきとセットで



### トコちゃんのお産セット

おひなまきSサイズまたはMSサイズ1枚と院内専用マイピーロネオ+1本がセットになった「トコちゃんのお産セット」もご用意しています。ご希望の方は、お問い合わせください。



院内専用天使の寝床と一緒に



※画像はイメージです

## 4.5kgを超えたら

### ●マイピーロネオ+ セット



色:ピンク



色:ミントグリーン

## TOPIC!

赤ちゃんが反りかえって泣くときは、マイピーロネオ体操がおすすめ！



### <お手入れ方法>

- ※インナー用の目の細かい洗濯ネットをご使用ください。
- ※色落ち・色移りする場合がありますので、他の物との同時洗濯はお避けください。
- ※漂白剤の使用、乾燥機や暖房器具を使った乾燥はしないでください。
- ※洗濯後は直射日光を避け、平置きで陰干ししてしっかりと乾燥させてください。
- ※アイロンは使用しないでください。



注意

- 枕の共用は交差感染の原因となりますので、一人一個ご使用ください。
- 本体の生地取り扱いには十分ご注意ください。生地が破れた場合は使用を中止してください。
- お子様がビーズやストッパーを誤って口に入れてしまう恐れがあります。万一飲み込んだ場合はすみやかに医師の診察を受けてください。  
またビーズを口に入れると歯に挟まってしまう恐れがあります。歯に挟まった場合はすみやかに歯科医院を受診してください。
- 必ず大人の目の届く範囲で、お子様が気持ち良さそうな表情をしているかどうかを観察しながらご使用ください。
- 使用中に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 一日中同じ姿勢で寝かせるのではなく、ポジショニング(姿勢調整)をしてください。
- 起きている間はつけっぱなしにせず、腹這いなどで遊んであげるよう、ご家族にご指導ください。