


ふわっと腹巻

薄手オーガニック セミロング

【入数】2枚 【丈】約60cm

日本製

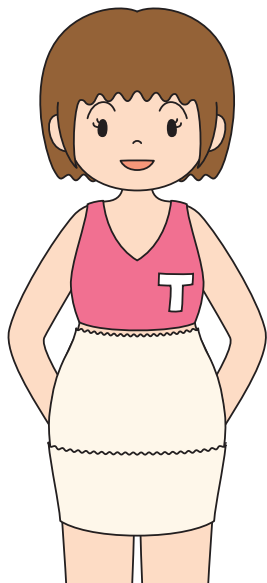

自然素材で優しい着け心地

- トコちゃんベルト装着時の汗を吸収し、皮膚を保護します。
- 無農薬で栽培された綿花を使用しているので、自然の風合いが出て、心地良い肌触りです。
- 直接お肌に触れる部分はオーガニックコットン100%にこだわりました。伸縮素材に「綿力バー糸」（芯材ポリウレタンにオーガニックの綿糸を二重に巻きつけるダブルカバリング方式で作られた糸）を採用し、よりお肌を優しく守ります。

※カケンテストセンターによる品質検査を受けています。

<お手入れ方法>

※漂白剤の使用、乾燥機や暖房器具を使った乾燥はしないでください。

※インナー用の目の細かい洗濯ネットをご使用ください。

※製品の性質上、使用すると横に伸びやすくなるため、洗濯時は縦方向へ引っ張り、形を整えてから干してください。

※開封後の交換・返品はお受けできませんので、ご注意ください。

※開封前の交換・返品は、購入先にお問い合わせください。



骨盤ケアとマタニティ&ベビーケア用品

トコちゃんベルトの青葉


有限会社 青葉 <https://tocochoan.jp>

〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1


TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508



着用方法例

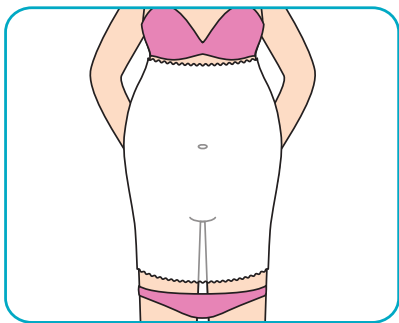


- 1** ショーツをすらし素肌に腹巻を着け、上端をアンダーバストに合わせます。

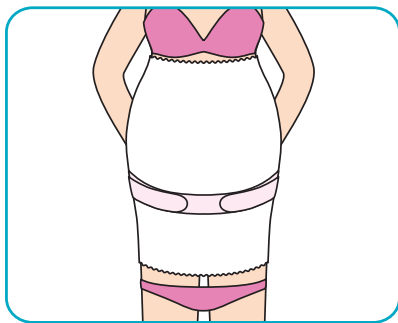


- 2** トコちゃんベルトIまたはIIを着用します。

★必ずトコちゃんベルトの着用方法を参照してください。

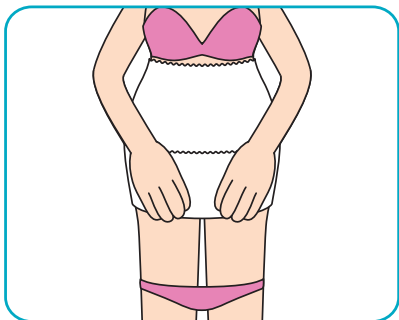

- 3** トコちゃんベルトの下の部分を折り上げます。

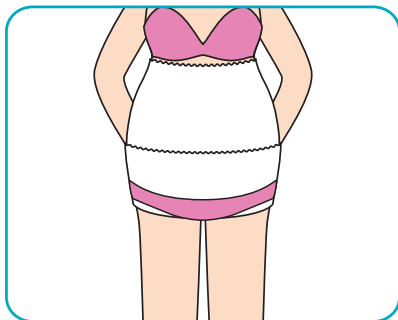


- 4** 最後にその上からショーツをはきます。

※トコちゃんベルトの上ラインを越えないショーツをはきましょう。




こんな使い方も

詳しい使い方はホームページをご覧ください。

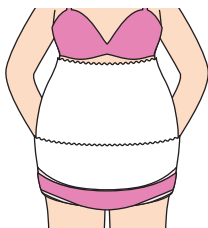

腹巻を股下約2cmで折り上げ、着けることもできます。

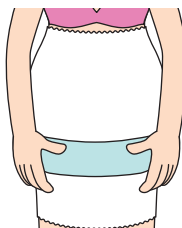

タオルを挟みこんで着けることもできます。