

トコちゃんベルトのプラスアイテム

トコちゃん ベルト用 妊婦帯Ⅲ

【素材】


表面：ポリエステル 100%

裏面：綿 100%

「お腹を下から手で支え上げたい」

「腰が痛い」

と思ったときに、オススメです。

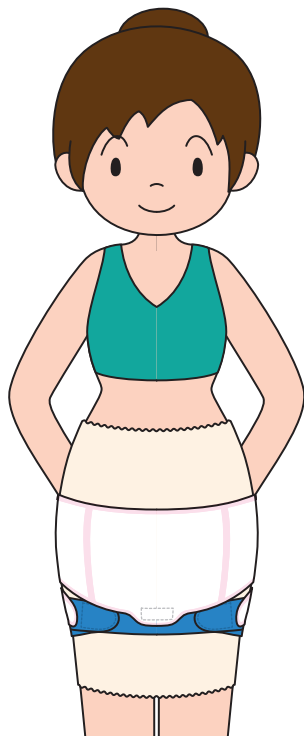


＜お手入れ方法＞

※漂白剤の使用・乾燥機や暖房器具を使った乾燥はしないでください。


※インナー用の目の細かい洗濯ネットをご使用ください。

※両端の面ファスナーを内側に折り畳み、下部分の面ファスナーを本体にとめた状態で保管・洗濯してください。

①端から
折り畳む

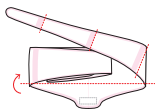

②下の部分を
折り上げる

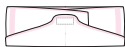

※商品の交換・返品は、購入先にお問い合わせください。



骨盤ケアとマタニティ&ベビーケア用品

トコちゃんベルトの青葉

有限会社 青葉 <https://toco-chan.jp>
〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1
TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508




着用方法例

★必ずトコちゃんベルトⅠまたはⅡの着用方法を参照してください。




1 ★トコちゃんベルトⅠまたはⅡをつけ、膝立ちになります。


2 妊婦帯Ⅲの面ファスナーをベルトの前側にとめます。

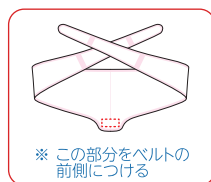

3 両端を持ち、後ろでクロスさせます。

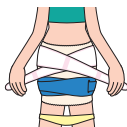


4 先端の面ファスナーをトコちゃんベルトに仮止めします。

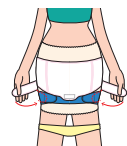

5 骨盤高位の姿勢をとり、仮止めした妊婦帯Ⅲの両端をトコちゃんベルトから外してゆるみを取り、再度とめます。

強く引かないで！

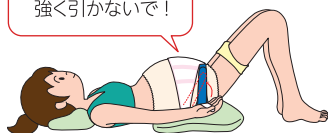

6 腹巻を折り上げ、ショーツをはいて完成です。

【着用順番】

- ①腹巻
- ②トコちゃんベルト
- ③妊婦帯
- ④ショーツ



骨盤底筋をサポート



商品詳細→



トコサポートをプラスで骨盤底筋がシャキッ！

【着用順番】

- ①腹巻
- ②トコちゃんベルト
- ③妊婦帯
- ④トコサポート
- ⑤ショーツ

最後に腹巻を折り上げます。



延長パーツで幅広く対応

「もう少し長いといいのに…」
そんなときは延長パーツを！

