


妊娠中～産後のお腹をしっかりカバー！

トコちゃん
の

ふわっと腹巻

オーガニック

セミロング

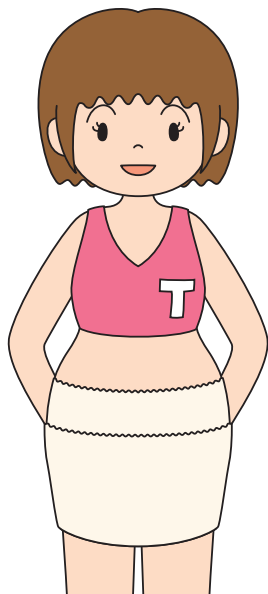

【丈】 約60cm

【使用素材】

メイン素材：オーガニックコットン

伸縮素材：綿カバー糸（オーガニックコットン・PU）



自然素材で優しい着け心地

- トコちゃんベルト装着時の汗を吸収し、皮膚を保護します。
- 無農薬で栽培された綿花を使用しているため、自然の風合いが出て、心地良い肌触りです。
- 直接お肌に触れる部分はオーガニックコットン100%にこだわりました。伸縮素材に「綿カバー糸」（芯材ポリウレタンにオーガニックの綿糸を二重に巻きつけるダブルカバーリング方式で作られた糸）を採用し、よりお肌を優しく守ります。

※カケンテストセンターによる品質検査を受けています。

<お手入れ方法>

※漂白剤の使用、乾燥機や暖房器具を使った乾燥はしないでください。

※インナー用の目の細かい洗濯ネットをご使用ください。

※開封後の交換・返品はお受けできませんので、ご注意ください。

※開封前の交換・返品は、購入先にお問い合わせください。




骨盤ケアとマタニティ&ベビーケア用品

トコちゃんベルトの青葉


有限会社 青葉 <https://toco-chan.jp>
〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1
TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508



着用方法例

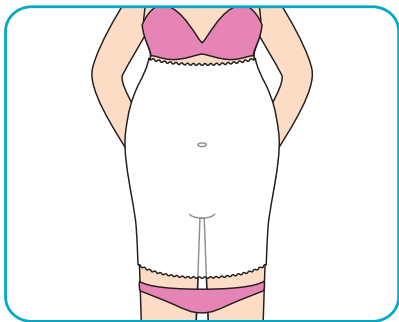


- 1** ショーツをずらし素肌に腹巻を着け、上端をアンダーバストに合わせます。

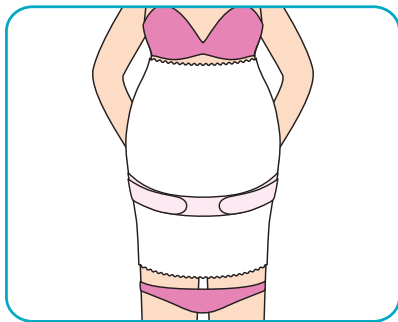


- 2** トコちゃんベルトIまたはIIを着用します。

★必ずトコちゃんベルトの着用方法を参照してください。

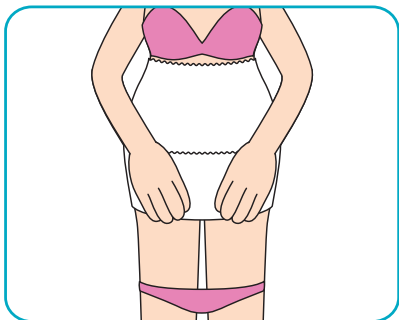

- 3** トコちゃんベルトの下の部分を折り上げます。

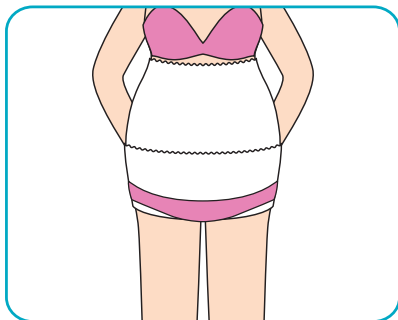


- 4** 最後にその上からショーツをはきます。

※トコちゃんベルトの上ラインを越えないショーツをはきましょう。




こんな使い方も

詳しい使い方はホームページをご覧ください。

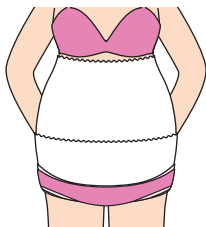

腹巻を股下約2cmで折り上げ、着けることもできます。

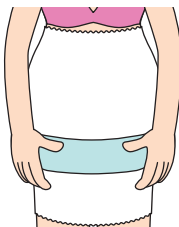

タオルを挟みこんで着けることもできます。


妊娠中～産後のお腹をしっかりカバー！

トコちゃん
の

ふわっと腹巻

オーガニック

ロング

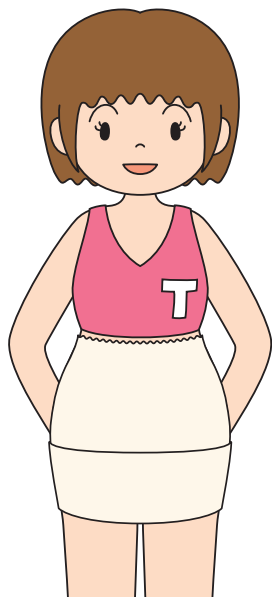

【丈】 約80cm

【使用素材】

メイン素材：オーガニックコットン

伸縮素材：綿カバー糸（オーガニックコットン・PU）



自然素材で優しい着け心地

- トコちゃんベルト装着時の汗を吸収し、皮膚を保護します。
- 無農薬で栽培された綿花を使用しているため、自然の風合いが出て、心地良い肌触りです。
- 直接お肌に触れる部分はオーガニックコットン100%にこだわりました。伸縮素材に「綿カバー糸」（芯材ポリウレタンにオーガニックの綿糸を二重に巻きつけるダブルカバーリング方式で作られた糸）を採用し、よりお肌を優しく守ります。

※カケンテストセンターによる品質検査を受けています。

<お手入れ方法>

※漂白剤の使用、乾燥機や暖房器具を使った乾燥はしないでください。

※インナー用の目の細かい洗濯ネットをご使用ください。

※開封後の交換・返品はお受けできませんので、ご注意ください。

※開封前の交換・返品は、購入先にお問い合わせください。




骨盤ケアとマタニティ&ベビーケア用品

トコちゃんベルトの青葉

有限会社 青葉 <https://toco-chan.jp>
〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1
TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508




着用方法例

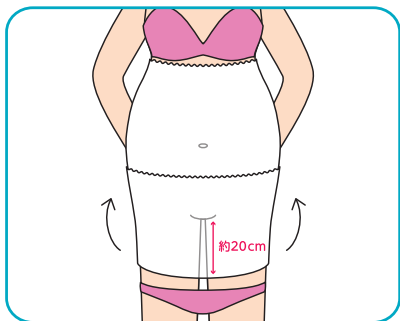


- 1** ショーツをずらし素肌に腹巻を着け、上端をアンダーバストに合わせて。股下約20cmあたりで折り上げます。

※折り上げた際に、へそより上になった場合は調整しましょう。

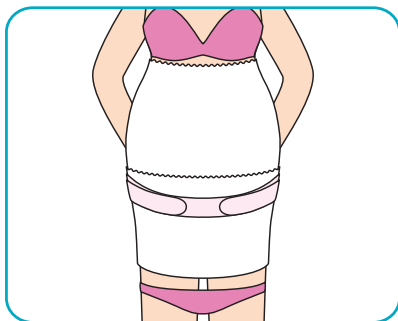


- 2** トコちゃんベルトIまたはIIを着用します。

★必ずトコちゃんベルトの着用方法を参照してください。

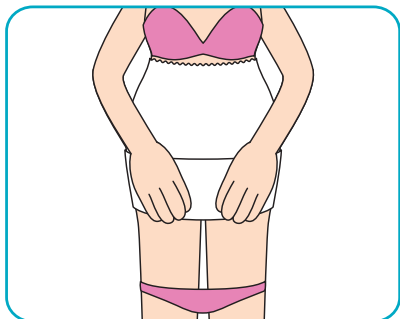

- 3** トコちゃんベルトの下の部分を折り上げます。

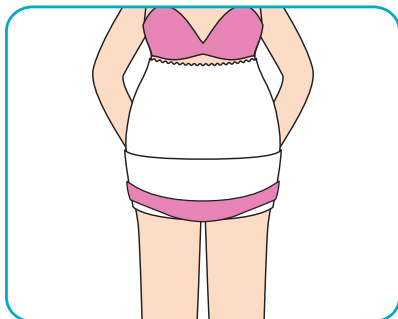


- 4** 最後にその上からショーツをはきます。

※トコちゃんベルトの上ラインを越えないショーツをはきましょう。




こんな使い方

詳しい使い方はホームページをご覧ください。

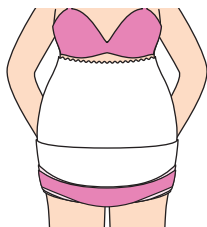

腹巻を股下約2cmで折り上げ、着けることもできます。

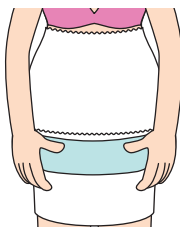

タオルを挟みこんで着けることもできます。