

妊娠中や産後のお役立ちアイテム

ズレ防止パーツ

トコちゃんベルトのズレ上がりを防ぐ

こんな方におすすめ！

- ✓ 座り仕事が多い
- ✓ 切迫早産で安静と言われている
- ✓ 骨盤のゆるみが大きく、
就寝時も支えておきたい



【使用素材】ポリエステル

【適応サイズ】トコちゃんベルトⅠ：M・L
トコちゃんベルトⅡ：M・L

※ご注意



ズレ防止パーツはトコちゃんベルトⅠまたはⅡとの併用を目的とした仕様となっており、単独では着用できません。

＜洗濯時の注意＞

※漂白剤の使用、乾燥機やアイロン、暖房器具を使った乾燥はしないでください。

※面ファスナー部分にゴミなどがつかないように、面ファスナー部分同士を重ね合わせてください。

※インナー用の細かい洗濯ネットをご使用ください。

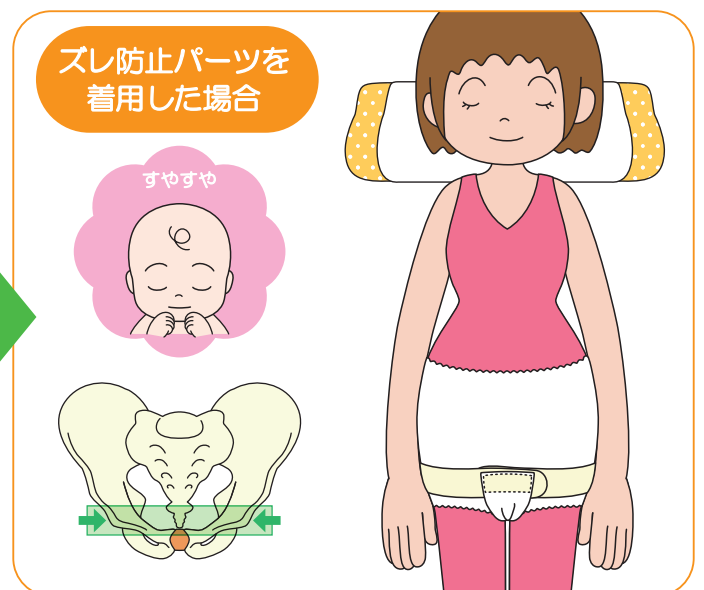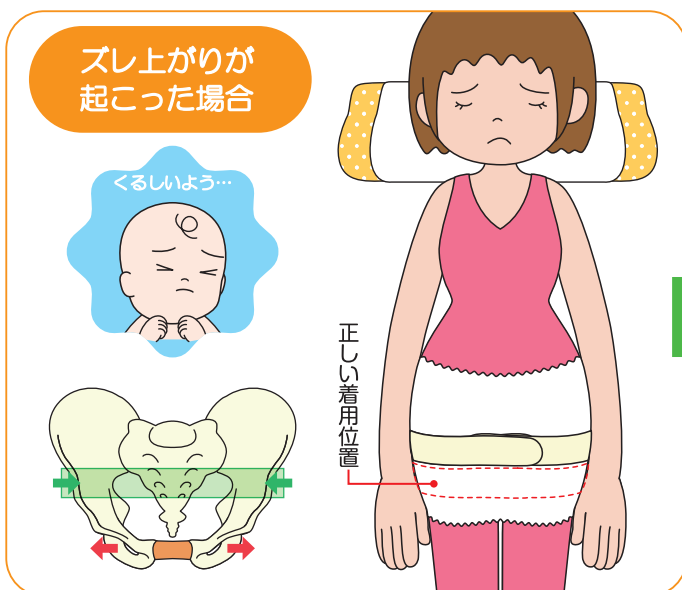

※商品の交換・返品は、購入先にお問い合わせください。



骨盤ケアとマタニティ&ベビーケア用品


トコちゃんベルトの青葉

有限会社 青葉 <https://toco-chan.jp>


〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1
TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508




ズレ防止パーツの使い方

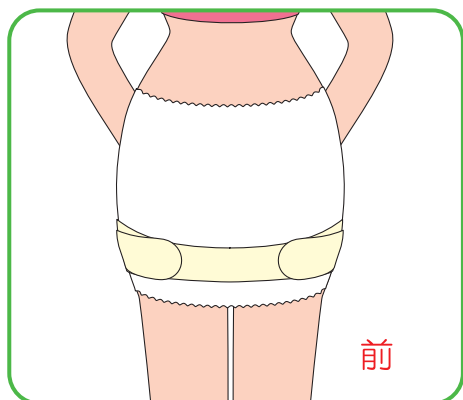


1 腹巻を着け、トコちゃんベルトⅠまたはⅡを着用します。
★必ずトコちゃんベルトの着用方法を参照してください。

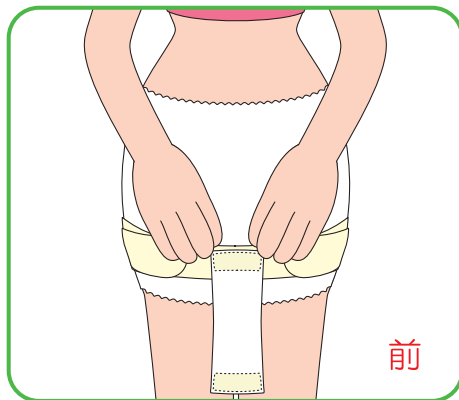

2 ズレ防止パーツを前側につけます。

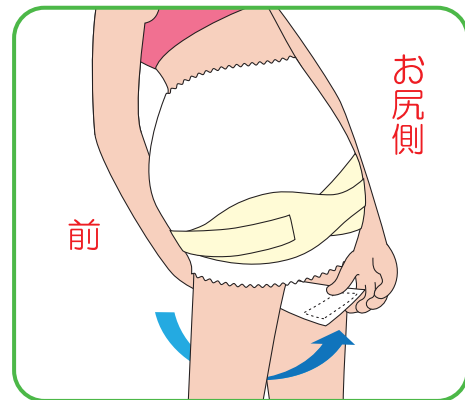


3 前からお尻へと股の間を通します。
★ズレ防止パーツが直接肌に触れるのが気になる方はナプキンなどを付けてください。

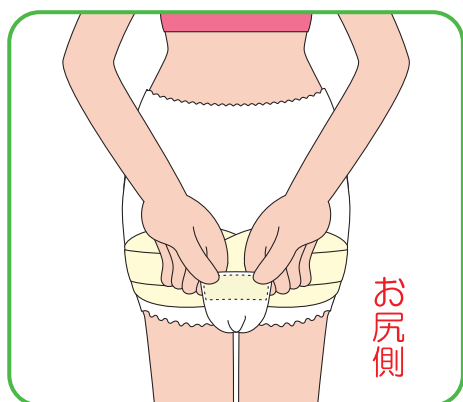

4 お尻側を止めます。




トイレの時は

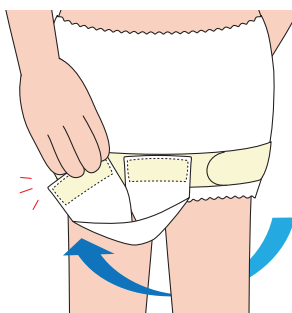

お尻側の面ファスナーをはがし、前側に止めておきます。
ベルトの後ろ側を少し上へずらしましょう。

ショーツをはく時は

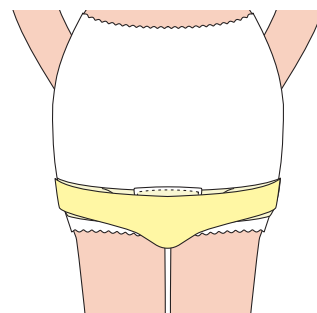


最後にショーツをはいてもかまいません。

ズレを防止して着用位置をしっかりキープ!

骨盤輪をしっかり支えるには着用位置が重要です。

- ①大転子の横のでっぱりでベルトがかかる
- ②恥骨結合にベルトがかかる
- ③上前腸骨棘にベルトがかからない

締め過ぎに注意!
「気持ちの良い強さ」で

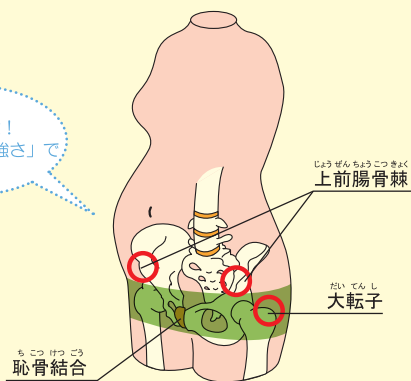

関連商品

*厚手腹巻 各色2枚組
(ピンク・サックス・
ネイビー・グレー)



*アンダー腹巻 2枚組



*オーガニックコットン厚手腹巻 2枚組

