

産後のお腹のだぶつきもしっかりカバー！

オーガニックコットン 厚手腹巻

M

【素材】 オーガニックコットン
ポリウレタン繊維（伸縮素材）

【入数】 2枚

【丈】 約60cm

（特徴）

- トコちゃんベルト装着時の汗を吸収し、皮膚を保護し、脚の付け根に食い込む感覚を軽減します。
- 無農薬で栽培された綿花を使用していますので、自然の風合いが出て、心地よい肌触りです。


※開封後の交換・返品はお受けできませんので、ご注意ください。

※開封前の交換・返品は、購入先にお問い合わせください。

<洗濯時の注意>

※漂白剤の使用、乾燥機や暖房器具を使った乾燥はしないでください。

※インナー用の目の細かい洗濯ネットをご使用ください。

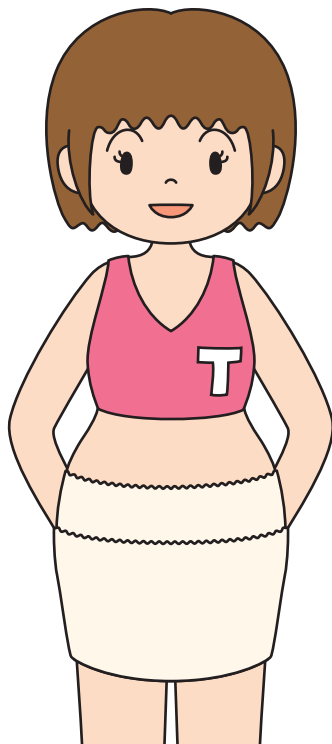


骨盤ケアとマタニティ&ベビーケア用品

トコちゃんベルトの青葉


有限会社 青葉 <http://tocochoan.jp>
〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1
TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508



厚手腹巻の着用方法例

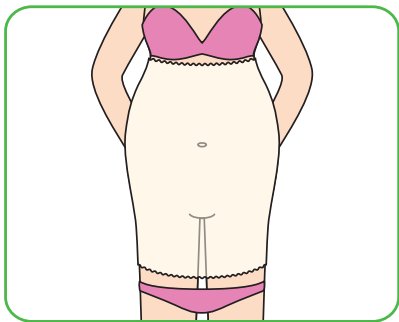


1 ショーツをずらし素肌に厚手腹巻を着け、上端をアンダーバストに合わせます。

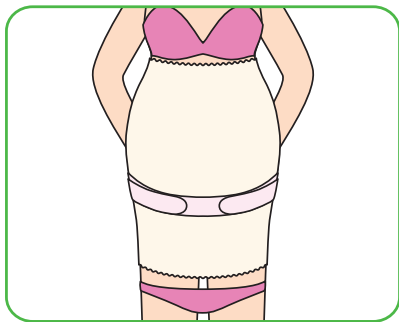


2 トコちゃんベルトIまたはIIを着用します。

★必ずトコちゃんベルトの着用方法を参照してください。

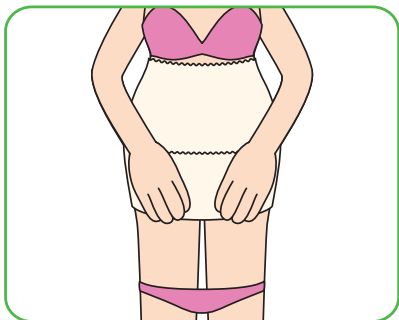

3 トコちゃんベルトの下の部分を折り上げます。

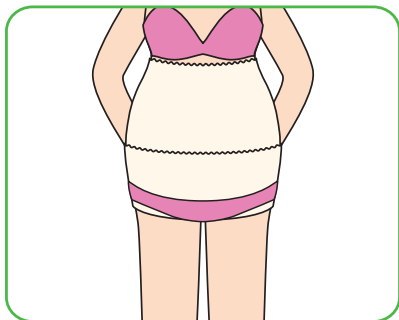


4 最後にその上からショーツをはきます。

※トコちゃんベルトの上ラインを越えないショーツをはきましょう。




こんな使い方

詳しい使い方はホームページをご覧ください。

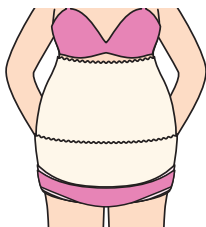

厚手腹巻を股下約2cmで折り上げ、着けることもできます。

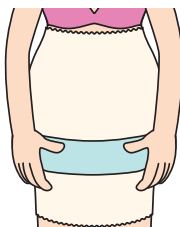

タオルを挟みこんで着けることもできます。

産後のお腹のだぶつきもしっかりカバー！

オーガニックコットン 厚手腹巻



【素材】 オーガニックコットン
ポリウレタン繊維（伸縮素材）

【入数】 2枚

【丈】 約80cm

（特徴）

- トコちゃんベルト装着時の汗を吸収し、皮膚を保護し、脚の付け根に食い込む感覚を軽減します。
- 無農薬で栽培された綿花を使用していますので、自然の風合いが出て、心地よい肌触りです。


※開封後の交換・返品はお受けできませんので、ご注意ください。

※開封前の交換・返品は、購入先にお問い合わせください。

<洗濯時の注意>

※漂白剤の使用、乾燥機や暖房器具を使った乾燥はしないでください。

※インナー用の目の細かい洗濯ネットをご使用ください。

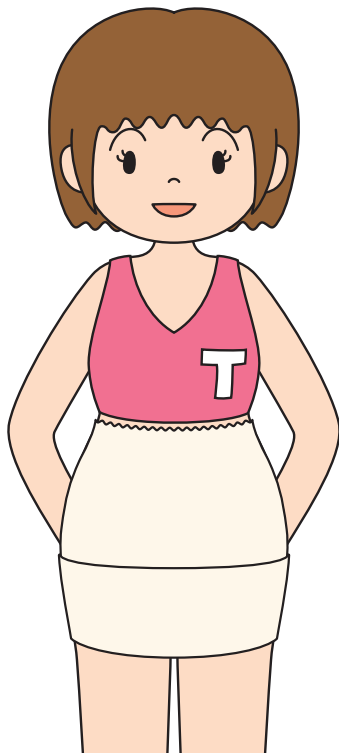

骨盤ケアとマタニティ&ベビーケア用品


トコちゃんベルトの青葉

有限会社 青葉 <http://tocochoan.jp>

〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1
TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508




厚手腹巻の着用方法例

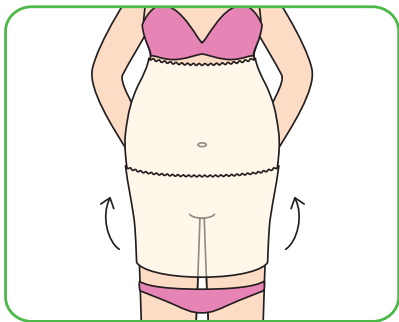


- 1** ショーツをずらし素肌に厚手腹巻を着け、上端をアンダーバストに合わせます。股下約20cmあたりで折り上げます。

※折り上げた際に、へそより上になった場合は調整しましょう。

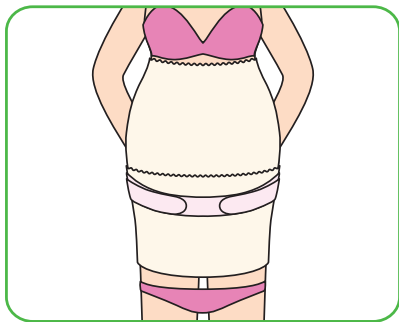


- 2** トコちゃんベルトIまたはIIを着用します。

★必ずトコちゃんベルトの着用方法を参照してください。

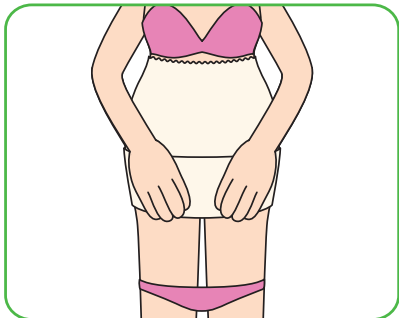

- 3** トコちゃんベルトの下の部分を折り上げます。

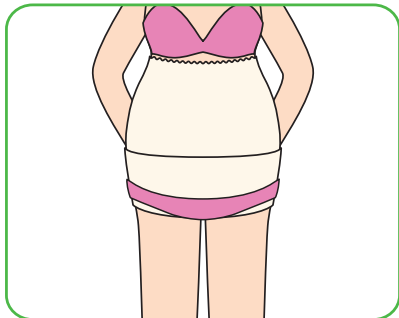


- 4** 最後にその上からショーツをはきます。

※トコちゃんベルトの上ラインを越えないショーツをはきましょう。




こんな使い方も

詳しい使い方はホームページをご覧ください。

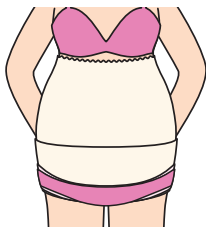

厚手腹巻を股下約2cmで折り上げ、着けることもできます。

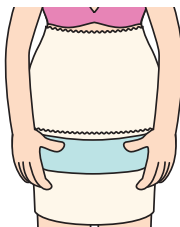

タオルを挟みこんで着けることもできます。