

分娩直後～退院までの間、
ママの骨盤を \ キュッ! / と固定


直後ケアベルト




使用方法

仰向けに寝て締めて下さい


2枚入り (S字フック付)
透湿性生地で、ムレにくく安心
汚れたら、新しいベルトに交換

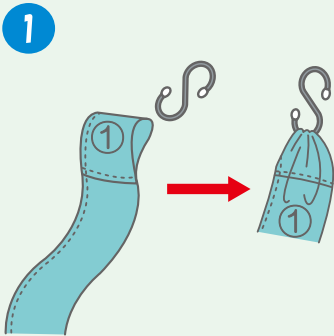


ベルト (緑) の輪①に付属のS字フックを通します。

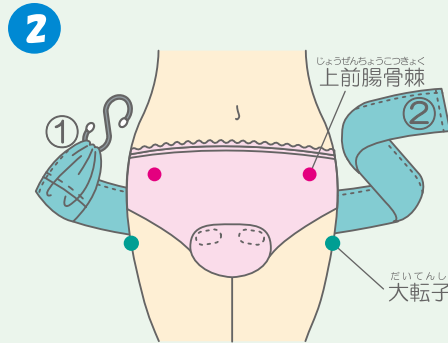



ベルト (緑) をベッドとショーツの間に通しますが、横からではなく、太もも側からお尻をすくいあげるようにします。

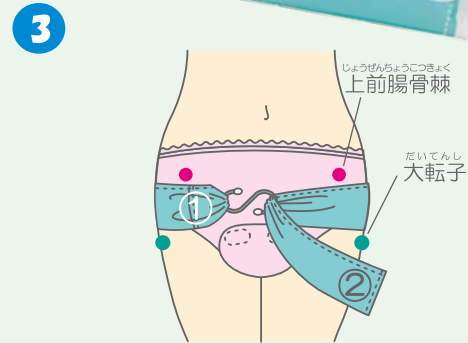


ベルト (緑) の下ラインは「●大転子」に一致するように、また、締めたときにS字フックが体の中心にくるようにセットします。
決してベルトが「●上前腸骨棘」にかからないよう!

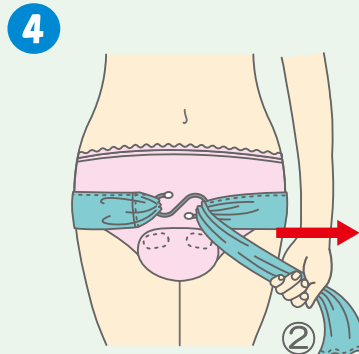


②を持ち「骨盤高位」の姿勢で気持ちよい強さになるまで矢印の → 方向に締めます。このときS字フックが体の中心になるように。

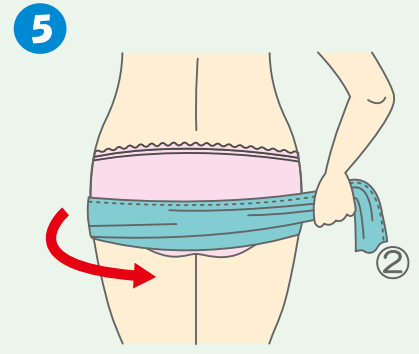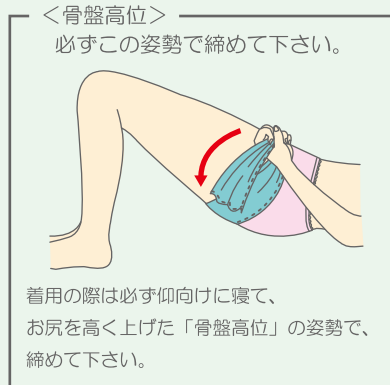

手を持ち替えてベルト②をしっかりと締めながら背面に回します。

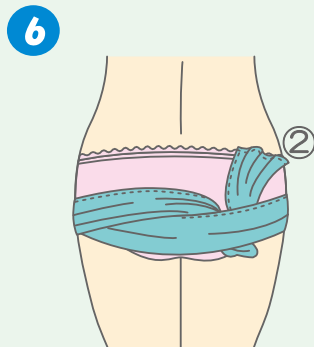

ベルト②を締めているベルトとヒップの間にしっかりと挟み込みます。

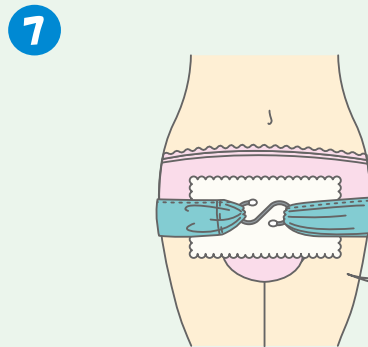

座ったり、立った時に強すぎる場合は、気持ち良い締め心地になるまで少し緩めて下さい。

装着の位置等がわからない場合は助産師にお尋ね下さいネ。

ベルトが食い込んで痛い方は間にタオル等を挟んでご着用下さい。



【品コード】 92118 【品名】 直後ケアベルト 【JAN】 4904820921186 【入り数】 100袋/ケース (25袋×4ポリ袋)



大衛株式会社

本社 | 〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-3-3 [お客様相談窓口] TEL.06-6921-7373

札幌 TEL.011-817-3600 仙台 TEL.022-225-2745 千葉 TEL.043-234-6157 埼玉 TEL.048-653-1113
 東京 TEL.03-5923-0341 横浜 TEL.045-942-9525 名古屋 TEL.052-369-4110 大阪 TEL.06-6928-7245
 学研都市 TEL.072-856-6531 広島 TEL.082-211-2166 福岡 TEL.092-622-8415 コンシューマ事業部

TEL.052-355-2711