

赤ちゃんが泣きやみ、ぐっすり眠る

まるまるねんね シリーズ 院内専用 天使の寝床

赤ちゃんが器用でじょうぶな子どもに育つ

助産師さんや小児科の先生方からの「赤ちゃんがなかなか泣き止まず、寝ない」「赤ちゃんが良く寝る寝具を販売してほしい」との声をもとに開発しました。

児に負担なく頸～胸部の脊柱の生理的彎曲を維持し健やかな入眠を促します。

また、重力下で自身を支えるための筋力が不足している生後～定頸時において脊柱の生理的彎曲を維持し、手足の位置のバランスをとることは、その後の脊柱の成長のためにも大切な姿勢と考えられます。

ベビハグ

日本製



【対象】

分娩後、新生児期から退院まで
※ただし、個人差があります。

【寸法】

約61×38×高さ(頭)11(足)9.5cm

【使用素材】

表生地:綿 中綿:ポリエステル



院内専用 天使の寝床のメリット！

- ・新生児の脊柱や四肢を理想的な状態に保ち、快適に眠れる
- ・新生児の胎外生活への適応を促進
- ・新生児が泣き叫ばず、速やかに入眠するため、お母様方や看護スタッフの心身疲労を軽減



院内専用マイピーロ ネオ+と一緒に！

出生直後から新生児の首を守る首枕「院内専用マイピーロ ネオ+」を使うと、仰臥位でも側臥位でも気道が確保され、頸～胸部の脊柱の生理的彎曲が維持されます。そのため「まるまるねんね」がしやすくなります。

※「院内専用マイピーロ ネオ+」を使用しない場合は「マイピーロ ネオ+」またはハンドタオルなどを丸めて首枕としてお使いください。



注意

- ※ 枕の共用は交差感染の原因となりますので、一人一個ご使用ください。
- ※ 院内のみで使用し、決して家庭用として貸し出しや転売はしないでください。

※開封後の返品・交換はお受けできませんので、ご注意ください。
※開封前の返品・交換は、購入先にお問い合わせください。



骨盤ケアとマタニティ&ベビーカー用品

トコちゃんベルトの青葉

有限会社 青葉 <https://toco-chan.jp>
〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1
TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508



院内専用 天使の寝床の使用法

- 1 寝床をシーツかタオルで覆ってください。寝床の汚染防止には厚めのバスタオルを二つ折りにして使うのがお勧めです。
- 2 新生児をおひなまきなどの上に寝かせ、院内専用マイピーロネオ+（専用首枕）もしくはマイピーロネオ+を首に着用します。
- 3 衣服やおひなまきなどで新生児をくるんでください。（使用例の写真参照）
- 4 毎授乳後、くるんだまま仰臥位、右側臥位、左側臥位と、体位交換してください。（ポジショニング）

ポジショニング（姿勢調整）



仰臥位ばかりだと、向きぐせができたりに“絶壁頭”になってしまいます。授乳ごとに、右側臥位→仰臥位→左側臥位→右側臥位→…と体位交換をすることにより、丸い頭に近づいていきます。

使用例



服の中での足の状態



<お手入れ方法>

- ※手洗い可
- ※洗濯機洗い、脱水機可*（洗濯ネット使用）
- ※漂白剤、乾燥機、アイロン使用不可
- ※形を整え、風通しの良い日陰で平置きにしてしっかり乾燥させてください。
- ※他の物と同時洗濯する場合は、色落ち、色移りにご注意ください。

*脱水は様子を見ながら、1分以内を複数回行ってください。

詳しいお手入れ方法はHPをご覧ください。

