

お出かけのときにも首と呼吸をまもる

トコちゃんの おでかけ用 マイピーロベビー+

有限会社 青葉 <https://toco-chan.jp>
〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6-1
TEL.072-960-0507 FAX.072-960-0508



【品質】
綿・ポリウレタン・
プラスチックビーズ

【対象目安】生後7ヶ月～



チャイルドシートやベビーカー・抱っこひもの首支えにも

首の前カーブができ、だんだんと腰の前カーブがしっかりすると、背骨全体の「S字状カーブ」ができあがります。

首のカーブを心地良く保ち、ぐらぐらしがちな首を守ります。

お出かけに便利なショートサイズの首枕です。



※ストッパー紛失防止用ループは切らないでください。



「トコちゃんのふわっと腹巻 薄手」または「トコちゃんのふわっと腹巻 薄手オーガニック ショート」と一緒にお使いください。



こんなときに



ベビーカー・ベビーカー等

首がぐらぐらしない

眠っても首が安定!



※不要なときは外しましょう。

※商品の返品・交換は、購入先にお問い合わせください。



骨盤ケアとマタニティ&ベビーケア用品


トコちゃんベルトの青葉




着用方法例

トコちゃんのふわっと腹巻 薄手(別売)、または
トコちゃんのふわっと腹巻 薄手オーガニック ショート(別売)を使用してください

動いてもずれにくい着け方です。

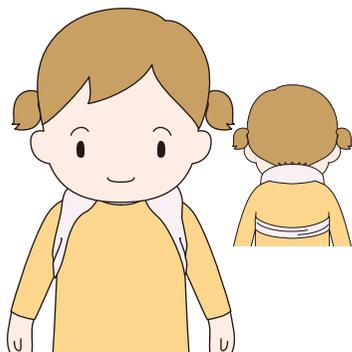


おでかけ用マイピーロ ベビー+

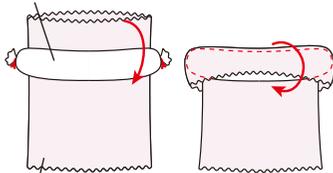

トコちゃんのふわっと腹巻 薄手

端から巻きつけて
輪にします。

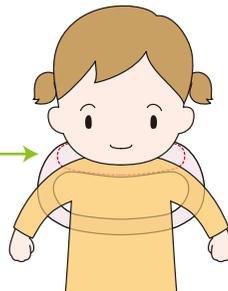

首に当たる
ように寝かせ
輪に腕を通します。




Point
背しヨコズを
ここに

トコちゃんのおでかけ用マイピーロ ベビー の調整例

赤ちゃんの体格に合わせて太さを調節してお使いください


あごが引けている感じがするとき・
細く感じる時

ストッパーを内側に寄せるほど太くなります。

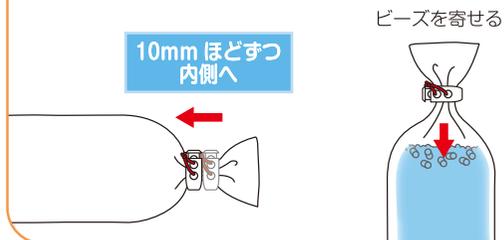


首が反っている感じがするとき・
太く感じる時

ストッパーを外側に動かすほど細くなります。

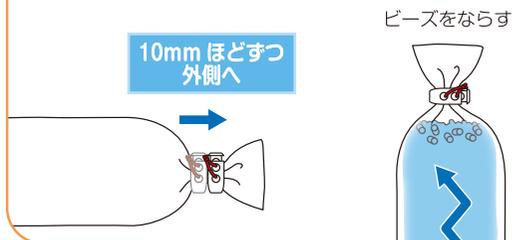

※調整し終わったら全体を軽くもんでビーズを均等にならします。

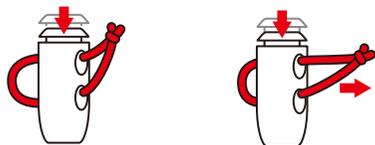

ストッパーのゆるめ方・締め方

ボタンを押すだけで適度に紐がゆるみます。ストッパーを内側または外側に動かしたら、ボタンを押しながら紐を引っ張ると締まります。

<お手入れ方法>

- ※インナー用の目の細かい洗濯ネットをご使用ください。
- ※色落ち・色移りする場合がありますので、他の物との同時洗濯はお避けください。
- ※漂白剤の使用、乾燥機や暖房器具を使った乾燥はしないでください。
- ※洗濯後は直射日光を避け、平置きで陰干ししてしっかりと乾燥させてください。
- ※アイロンは使用しないでください。



注意

- お子様がビーズやストッパーを誤って飲み込まないようにお取扱いください。万一飲み込んだ場合には、すみやかに医師の診察をお受けください。またビーズを口に入れると歯に挟まってしまう恐れがあります。歯に挟まった場合はすみやかに歯科医院を受診してください。
- 使用中に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 必ず保護者の目の届く範囲でお使いください。